

RECIPIENT ADMINISTRARE TRANSDERMICĂ (35 ML)

Instrucțiuni de utilizare



Pasul 1

Deschideți capacul dispozitivului prin plasarea degetului mare sub capătul capacului exterior de protecție și împingeți în sus.



Pasul 2

Rotiți baza pentru a distribui numărul de click-uri specificat în instrucțiunile de pe eticheta tratamentului. În cantitatea eliberată se află doza recomandată de medic pe prescripția magistrală.



Pasul 3

Urmăriți indicatorii vizuali când rotiți baza recipientului. Asigurați-vă ca după fiecare utilizare așezați recipientul în poziție verticală.

Pasul 4

Aplicați prin masaj crema care se află pe partea superioară a aplicatorului, pe o zonă fără pilozități, conform indicației medicului privind locul de administrare.



Pasul 5

Puneți capacul după fiecare utilizare. Asigurați-vă că este bine închis.



0723 159 560



Șos. Mihai Bravu nr. 251 - 253, Sector 3, București
Calea Dorobanților nr. 111 - 131, Sector 1, București



www.farmaciacrisia.ro



pacient@farmaciacrisia.ro

Notă:

Pentru a nu întrerupe tratamentul, solicitați din timp farmaciei Crisia efectuarea următorului preparat.