

RECIPIENT ADMINISTRARE TRANSDERMICĂ (35 ML)

Instrucțiuni de utilizare

Numărul total de click-uri/ doze de administrat.



Acest recipient vă oferă posibilitatea de a vedea numărul de click-uri/ doze pe care le aveți în total de administrat pentru perioada de tratament (dunga albastră).

1

Pasul 1

Scoateți capacul alb de protecție.

2

Pasul 2

Înainte de administrare, rotiți baza recipientului în sensul marcat (de la stanga la dreapta), până la auzirea semnalului sonor (click) și vizualizarea preparatului.

3

Pasul 3

Rotiți de câte ori este nevoie conform indicațiilor medicale. O rotire scurtă este echivalentul unui click/ doză.

4

Pasul 4

Aplicați crema în zona recomandată, până când aceasta este absorbită complet, folosind capătul aplicatorului.

Notă:

Este posibil ca, din punct de vedere vizual, dozele să pară diferite; totuși, aceste variații nu influențează eficacitatea tratamentului pentru perioada prescrisă.

Pentru a nu întrerupe tratamentul, solicitați din timp farmaciei Crisia efectuarea următorului preparat.



0723 159 560



Șos. Mihai Bravu nr. 251 - 253, Sector 3, București
Calea Dorobanților nr. 111 - 131, Sector 1, București



www.farmaciacrisia.ro



pacient@farmaciacrisia.ro