

RECIPIENT CU APLICATOR VAGINAL DOZARE PRECISĂ

Instrucțiuni de utilizare



1

Pasul 1

Plasați degetul mare sub capătul capacului exterior de protecție și împingeți în sus, pentru a pregăti montarea aplicatorului.



2

Pasul 2

Atașați aplicatorul la orificiul de umplere al recipientului. Rotiți baza recipientului de la stânga la dreapta pentru a umple aplicatorul, urmărind doza recomandată măsurată în ml.



3

Pasul 3

Așteptați ca după fiecare click să se elibereze complet în aplicator cantitatea recomandată de medic, conform gradației notată pe piston.



4

Pasul 4

Îndepărtați aplicatorul de pe orificiul de umplere. Acesta este gata de utilizare. După introducere, apăsați pistonul până la capăt pentru a se distribui doza exactă recomandată. **După fiecare utilizare, aplicatorul se va curăța și recipientul se va închide.**



0723 159 560



Șos. Mihai Bravu nr. 251 - 253, Sector 3, București
Calea Dorobanților nr. 111 - 131, Sector 1, București



www.farmaciacrisia.ro



pacient@farmaciacrisia.ro

Notă:

Pentru a nu întrerupe tratamentul, solicitați din timp farmaciei Crisia efectuarea următorului preparat.