

68.5 mm



45 mm

RECIPIENT PENTRU TRATAMENTE VETERINARE

Instrucțiuni de utilizare

Pasul 1

Plasați degetului mare sub capătul capacului exterior de protecție și împingeți în sus, pentru a deschide recipientul.

Pasul 2

Rotiți baza recipientului de la stânga la dreapta pentru a distribui numărul de click-uri/ doze specificat în instrucțiunile de pe eticheta tratamentului.

Pasul 3

Urmăriți indicatorii vizuali/ auditivi atunci când rotiți baza recipientului.

Pasul 4

Administrați pacientului pe cale orală (prin lingere) tratamentul care se află pe partea superioară a aplicatorului, conform indicațiilor medicului.

Pasul 5

După fiecare utilizare se va curăța suprafața de administrare și se va pune la loc capacul.

NOTĂ

Pentru a nu întrerupe tratamentul, solicitați din timp farmaciei Crisia efectuarea următorului preparat, ajutându-vă de următoarele indicii:
Când linia superioară a pistonului atinge linia în relief de sub cuvântul „REFILL” (REUMPLERE) este momentul să efectuați o nouă solicitare de tratament.



0723 159 560

Șos. Mihai Bravu nr. 251 - 253, Sector 3, București
Calea Dorobanților nr. 111 - 131, Sector 1, București

pacient@farmaciacrisia.ro



www.farmaciacrisia.ro

