

## RECIPIENT ADMINISTRARE TRANSDERMICĂ - UZ VETERINAR

### Instrucțiuni de utilizare



#### Pasul 1

Introduceți o recompensă în suportul special aflat pe capacul de siguranță, pentru a ajuta animalul să se acomodeze cu recipientul.



#### Pasul 2

Țineți baza recipientului și trageți capacul în poziție verticală.



#### Pasul 3

Rotiți baza recipientului spre dreapta până când se evidențiază preparatul. Acum este gata de administrare.

**\*Acest pas este urmat doar la prima utilizare**



#### Pasul 4

Înclinați recipientul pentru a elibera recompensa din suport.



#### Pasul 5

Setați numărul de „click-uri” recomandat de medic. Așteptați 30 secunde pentru eliberarea dozei. Aplicați direct pe pavilionul urechii (într-o zonă fără pilozități), conform indicațiilor medicului veterinar.



#### Pasul 6

După utilizare, puneți la loc capacul de siguranță și asigurați-vă că este închis.



0723 159 560



Șos. Mihai Bravu nr. 251 - 253, Sector 3, București  
Calea Dorobanților nr. 111 - 131, Sector 1, București



[www.farmaciacrisia.ro](http://www.farmaciacrisia.ro)



[pacient@farmaciacrisia.ro](mailto:pacient@farmaciacrisia.ro)

Notă:

Pentru a nu întrerupe tratamentul, solicitați din timp farmaciei Crisia efectuarea următorului preparat.